



車いす・車いす付属品

車いす

●自操式車いす・介助式車いす

M-43K

コードNo.21630-03




座幅 38 40 42

●SW、低床、高床モデル
もあります。

座幅:38・40・42cm
自重:11.2kg

自操式

■寸法図 (単位:cm)

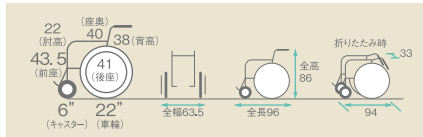

レンタル価格

..... ¥8,000

利用者負担

..... ¥800

MC43K

コードNo.21613-22




座幅 38 40 42

●10kg以下のアルミ製
超軽量モデルです。
●SWモデルもあります。

座幅:38・40・42cm
自重:9.9kg

介助式

■寸法図 (単位:cm)

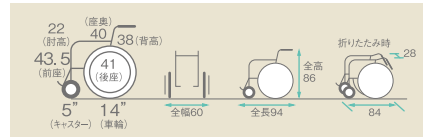

レンタル価格

..... ¥8,000


利用者負担

..... ¥800

車いすのサイズ合わせ

車いすは、大きすぎても小さすぎても使いにくいものです。ご利用者の体の寸法に合わせて選んでいただくことが大切。モジュール型車いすは、実際に座ってもらい、幅・長さ・高さ・角度などを確かめて使う人の体に合うサイズに調整することが可能です。


ほとんどの車いすは、フットレストの調整ネジを弛めることで高さを変えることができます。

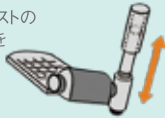

フットレスト高

床から50mm以上の高さで、太股が軽く座面にふれる高さにします。

肘掛けの高さを調整できます。

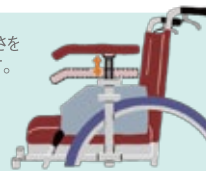

アームレスト高

肘が自然にアームレストに付く高さにします。

座シート幅

お尻の横に手のひらが両側とも入るだけの幅にします。

バックレスト高

ハンドリムを動かす場合は、肩甲骨下端の高さにし、座った時のバランスが悪い場合は、これより高くします。

座シート角度

角度を付けると座った姿勢が安定しますが、移乗や足での操作がしにくくなります。

座シート長

膝の後ろを圧迫しない長さにします。

座シート前座高

移乗しやすい高さにします。足で操作する場合は、かかとが床に付く高さにします。

●セミモジュール型車いす・モジュール型車いす

MYU226JDSW

コードNo.21627-21・22・23




スイングアウト 肘かけ 背張り

座幅 38 40 42

座幅:38・40・42cm
自重:約15.2kg

自操式

■寸法図 (単位:cm)

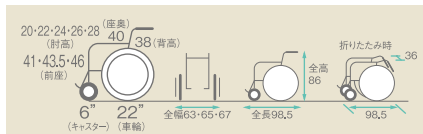

レンタル価格

..... ¥6,000

利用者負担

..... ¥600

MYU166JDSW

コードNo.21609-51・52・53




スイングアウト 肘かけ 背張り

座幅 38 40 42

座幅:38・40・42cm
自重:約15kg

介助式

■寸法図 (単位:cm)

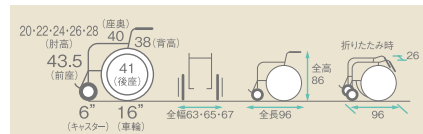

レンタル価格

..... ¥6,000

利用者負担

..... ¥600